

## Snabbstart guide Posifon GPS SmartSole



### 1. Ladda din Posifon GPS SmartSole

Matcha sulans ladd-symbol med mittpunkten på laddningsplattan. Laddplattan kommer att ge ifrån sig en signal och laddningsindikatorlampan kommer att byta från grön till blå färg. Testa att placera sulan på ett annat sätt om laddningsindikatorlampan inte byter färg.



### 2. Logga in appen i din SmartPhone eller på internetportalen.

I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter för att ansluta till internetportalen [www.track1.gtxcorp.com](http://www.track1.gtxcorp.com). På leveransbrevet finner du även uppgifterna du behöver för logga in via en app på din SmartPhone. Appen finns till Android och iPhone telefoner. Sök på GTX Corp Smart Locator i Google Play eller App Store.



### 3. Väck Posifon GPS SmartSole

Skaka den högra sulan lite lätt i några sekunder och placera den på ett ställe så att sulan har fri sikt mot himlen. Inom någon minut kommer sulan att meddela sin position.

*Se till att slutföra steg ett till tre innan du börjar med steg fyra. Efter att ni klippt och anpassat sulans storlek kan ni inte ångra ert köp.*



### 4. Anpassa Posifon GPS SmartSole

Ta ut båda sulor i nuvarande skor och använd de som en mall. Lägga respektive sula ovanpå GPS smartsole och använd en penna för att rista in hur ni skall klippa GPS SmartSole för bästa passform. Tänk på att ni ska bara klippa i framdelen vid tårna, se bilden till vänster.

*Klipp inte i den gröna delen av sulan runt hälen och hålfoten!*