


Snabbstart guide Posifon SmartSole



1. Ladda din Posifon SmartSole

Koppla in USB-kabeln i laddningsplattan och i strömadaptern. Stoppa sedan adaptern i lämpligt eluttag. Lagg SmartSole på plattan och matcha laddsymbolen på SmartSoles undersida med laddningsplattans mittpunkt. När LED-lampan runt laddaren ändrar färg till blå färg så laddar SmartSole, lyser den grönt så laddar den inte. När SmartSole laddat i 30 sekunder så slocknar LED-lampan. Det tar ungefär fyra timmar att ladda SmartSole fullt om batteriet har varit urladdat.

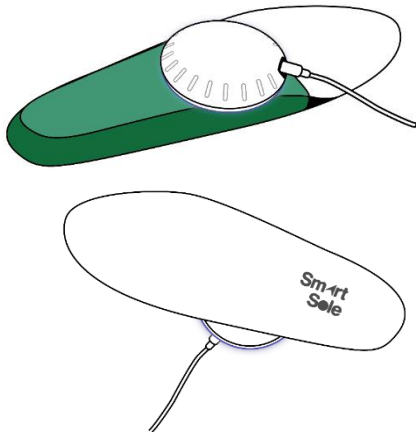

2. Logga in via webbläsare eller i appen på din SmartPhone.

I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter till systemet www.posifoncare.se och appen PosifonCare. Appen finns både till Android och iPhone telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store för att hitta den. Via appen kan du söka var brukaren befinner sig och hantera larm. Via webbgränssnittet kan du utöver detta också göra de inställningar som önskas. Detta kan göras från olika datorer så länge rätt inloggningsuppgifter används.



3. Väck Posifon SmartSole

Skaka den högra sulan lite lätt i några sekunder och placera den på ett ställe så att sulan har fri sikt mot himlen. Inom någon minut kommer sulan att meddela sin position. Starta en sökning i appen eller via internetportalen för att se positionerna.

Se till att slutföra steg ett till tre innan du börjar med steg fyra. Efter att ni klippt och anpassat sulans storlek kan ni inte ångra ert köp.

4. Anpassa Posifon SmartSole

Ta ut båda sulor i nuvarande skor och använd de som en mall. Lagg respektive sula ovanpå SmartSole och använd en penna för att rista in hur ni skall klippa SmartSole för bästa passform. Tänk på att ni ska bara klippa i framdelen vid tårna, se bilden till vänster.

Klipp inte i den gröna delen av sulan runt hälen och hålfoten!

