

Snabbstart guide Posifon Pico



1. Ladda din Posifon Pico

Placera Posifon Pico i medföljande laddstation. När enheten är korrekt placerad och laddningen påbörjas så kommer enheten vibrera lite lätt. En ljussignal visas på enhetens ovansida och på laddstationen att enheten laddar.

2. Se till att Posifon Pico är PÅ

Pico har två LED-lampor på enhetens sida. Se nedan vad de olika kombinationerna av ljussignaler innebär. Blinkar inte någon av LED-lamporna är enheten avstängd. Tryck på knappen på enhetens sida för att starta enheten.



3. Logga in via webbläsare eller i appen på din SmartPhone.

I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter till systemet www.posifoncare.se och appen PosifonCare. Appen finns både till Android och iPhone telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store för att hitta den. Via appen kan du söka var brukaren befinner sig och hantera larm. Via webbgränssnittet kan du utöver detta också göra de inställningar som önskas. Detta kan göras från olika datorer så länge rätt inloggningsuppgifter används.

Guide Pico LED-lampor:

Grön LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund
Blinkar två gånger snabbt var 3e sekund
Långsamma och långa blinkningar
Lyser med fast sken (blinkar ej)

=ansluten till GSM-nätet
= ansluten via GPRS
= söker GSM-nätet
= inget eller felaktigt SIM-kort

Blå LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund
Långsamma och långa blinkningar
Lyser med fast sken
Lysdiod av

= enhet har kontakt med GPS satelliter
= söker GPS satelliter
= laddning pågår
= i viloläge eller fulladdad (om laddning pågår)

Ingen lampa blinkar = Enhet avstängd