



Snabbstart guide Posifon Active

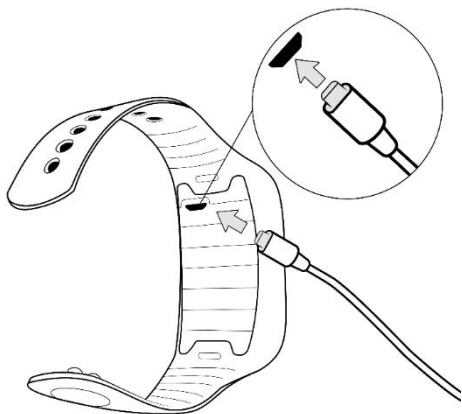

1. Ladda din Posifon Active


Koppla in laddarens kabeln i USB-kontakten på Active-enheten och i strömadaptern. Stoppa sedan adaptern i lämpligt eluttag.

Det tar ungefär två timmar att ladda Active. Batteriet är fulladdat när enhetens display slutar blinka och visar ett batteri som har alla staplat fyllda. Bilden till höger visar ett batteri som är till 80% laddat.

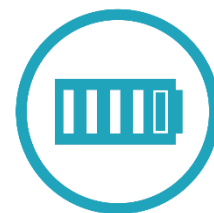

2. Daglig användning

För att se enhetens nuvarande batteri tryck på enhets display, se bild till höger. För att larma tryck och håll ner enhets display i 4 sekunder. En nedräkning från 20 kommer att påbörjas, när nedräkningen når 0 så kommer enheten att påbörja processen att skicka iväg larmet. För att avfärda larmet tryck enkelt på enhets display.

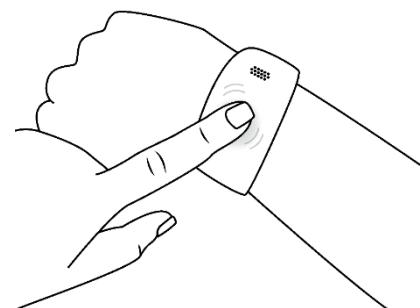

3. Logga in appen i din SmartPhone eller på internetportalen.



I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter för att ansluta till internetportalen www.posifoncare.se. På leveransbrevet finner du även uppgifterna du behöver för logga in via en app på din SmartPhone. Appen finns till Android och iPhone telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store. Via PosifonCare kan du söka var brukaren av Active befinner sig och göra de inställningar som efterfrågas.