

Snabbstart guide Posifon MiniFinder Pico



1. Ladda din Posifon MiniFinder Pico

Placera MiniFinder Pico i medföljande laddstation. När enheten är korrekt placerad och laddningen påbörjas så kommer enheten vibrera lite lätt. En ljussignal visas på enhetens ovansida och på laddstationen att enheten laddar.

2. Se till att MiniFinder Pico är PÅ

MiniFinder Pico har två LED-lampor på enhetens sida. En snabbguide finner du nedan som förklarar de olika ljussignalerna enheten ger ifrån sig. Blinkar inte någon av LED-lamporna är enheten avstängd. Tryck på enhetens sid-knapp för att starta enheten.



3. Logga in appen i din SmartPhone eller på internetportalen.

I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter för att ansluta till internetportalen www.posifoncare.se. På leveransbrevet finner du även uppgifterna du behöver för logga in via en app på din SmartPhone. Appen finns till Android och iPhone (lanseras under Oktober -18) telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store. Via PosifonCare kan du söka var brukaren av MiniFinder Pico befinner sig och göra de inställningar som efterfrågas.

Guide MiniFinder LED-lampor:

Grön LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund

Blinkar två gånger snabbt var 3e sekund

Långsamma och långa blinkningar

Lyser med fast sken (blinkar ej)

=ansluten till GSM-nätet

= ansluten via GPRS

= söker GSM-nätet

= inget eller felaktigt SIM-kort

Blå LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund

Långsamma och långa blinkningar

Lyser med fast sken

Lysdiod av

= enhet har kontakt med GPS satelliter

= söker GPS satelliter

= laddning pågår

= i viloläge eller fulladdad (om laddning pågår)

Båda LED-lamporna avstängda → Enhet avstängd