



Bruksanvisning Posifon Navy

Paketinnehåll

1. Posifon Navy (GPS-klocka)
2. Laddstation (a), Micro USB laddkabel (b), Transformator (c)
3. Bruksanvisning



Starta och ladda enheten

Koppla in micro-USB kabeln i laddstationen och transformatorn för att sedan föra in transformatorn i ett eluttag. Starta och ladda din Posifon Navy genom att placera den i laddstationen så att metallkontaktarna på klockans baksida placeras mot kontakten i laddstationen. När klockan är rätt placerad så ger den ifrån sig både en ljud- och en ljussignal. Den har då startat. En signal ges även när enheten är fulladdad.

Posifon Navy laddas fullt på mindre än 2 timmar.

Enheten bör inte laddas i mer än 4 timmar, för att säkerhetsställa batteriets livslängd.

Inställningar av tjänstens funktion

Inställningar av tjänstens funktion och larmmottagning görs i verksamhetssystemet PosifonCare. Information om hur detta görs finns i särskild bruksanvisning. I detta system hanteras även larmmottagning. För att kunna förändra inställningar måste man ha rätt behörighet i systemet. Kontakta din supportorganisation eller Posifons support vid frågor.

Det är viktigt att, till Posifon, uppge adressen där hemmafyrarna placeras vid igångsättandet med en ny brukare! Tjänsten kommer visa denna adress på kartan när enheten har kontakt en hemmafyr. Kontakta Posifons support för att uppge adressen.

Hur larmar man?

Larmknappen är placerad i klockans krona. För att aktivera, tryck och håll larm-knappen nedtryckt i några sekunder. Användaren får då en tydlig återkoppling genom en vibration när larmet aktiverats. Larmknappen kan även inaktiveras.



Pilen visar enhetens larmknapp som är inbyggd i klockans krona

Pilen visar enhetens larmknapp som är placerad i klockans ring

Posifon Navy – knappar och display

I enhetens display visas aktuell batterinivå och signalstyrka på det mobilnät som enheten har koppling mot. Det visas även om enheten är kopplad mot en hemmafyr eller tar GPS-position. Den inbyggda analoga klockan visar aktuell tid. Klockan ska vid leverans visa aktuell tid. Gör den inte det? Vänligen kontakta Posifons support.

Förutom larmknappen som sitter i enhetens krona så har Posifon Navy även fyra knappar i klockans ring. För att aktivera dessa ska man trycka hårt ovanför nummer 15/klockan 3, 30/klockan 6, 45/klockan 9 eller 60/klockan 12. När någon av knapparna aktiveras ger klockan en tydlig återkoppling och den valda åtgärden aktiveras. Knappen 30 används som larmknapp och ger samma funktion som larmknappen i enhetens krona.

Att ringa enheten

På bifogat leveransbrev står det vilket telefonnummer det är till din Posifon Navy. När någon ringer spelar enheten upp en melodislinga så att användaren av larmet hör att någon ringer. Efter några sekunder så kommer enheten att svara automatiskt. Om så önskas kan knappen 15 användas för att svara på samtal. Knappen 45 för att avvisa samtal. Samtalsfunktionen kan även inaktiveras.

Ringa från enheten

För att ringa någon från enheten, tryck på larmknappen i klockans krona. Bara ett kort tryck mindre än 1 sekunder. Enhetens display tänds och där visas de inlagda numren. Genom att använda knappen 60 väljer man vem som ska ringas upp. Vald mottagare rings upp genom att trycka på knappen 15. Avsluta samtalet genom att trycka på knappen 45. Kontakta Posifon support om du vill byta ett förprogrammerat telefonnummer.

Tolka lysdioderna

När enheten laddar så lyser den gula lysdioden, klockan 12. När den är fulladdad så lyser den gröna lysdioden, klockan 3. När enheten ur uttagen ur laddstationen så visar dioderna batteristatusen. När den gröna lyser så är det god batteristatus, när den gula tänds istället så bör enheten laddas. När den röda, klockan 9, tänds så måste enheten laddas snarast.

När man tryckt på larmknappen i klockans krona så tänds lysdioderna. Dessa indikerar då vilka knappar man kan trycka på för att komma vidare. Det går att inaktivera så att de inte lyser alls.

Placering av laddstationen och hemmafyrar i hemmet

Posifon Navy använder sig av hemmafyrar för att kunna positionera personen i hemmet och aktivera batterisparande funktionalitet. Hemmafyrens räckvidd är upp till 10 meter, men minskas av väggar mm. Placeringen av laddstationen och övriga hemmafyrar är därför av stor vikt för att energispar funktionen ska vara aktiv och bästa möjliga larmfunktionalitet ska ges. Om extra hemmafyrar köps så att de ger full täckning i hemmet, så kan larmfunktionen Lämna hemmazon användas. Det generas då ett larm när enheten inte längre har kontakt med någon fyr. På samma sätt kan meddelande skickas när enheten har kontakt igen.

Skötsel

Behöver enheten rengöras så rekommenderar vi att torka av enheten med på marknaden vanligt förekommande ytdesinfektionsmedel i måttlig mängd.

Ska enheten nyttjas till en ny brukare så rekommenderar vi att man byter armband. Behöver batteriet bytas? vänligen kontakta Posifons support.

Hårdvaruspecifikation

Storlek	48 mm x 17 mm
Vikt	65g
Batteri	500mAh Li-ion, uppladdningsbart
Frekvensband för GSM	900/1800MHz
Drifttemperatur	-20°C till +60°C
IP class	IP67
Batteritid	2-7 dagar
Kommunikation	GSM, GPRS, BLE 4.0

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa anvisningar och behåll dem för framtida bruk.
- Följ alla anvisningar och beakta de varningar som finns.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Försök inte att öppna och plocka isär enheten, den innehåller ej utbytbara komponenter, såsom batteriet. Ämnen i produktens innehåll och batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din Posifon Navy.
- Placera inte din Posifon Navy nära öppen eld eller i närheten av hög värme. Batteriet kan explodera!
- Låt aldrig barn under 3 år leka med Posifon Navy. De små komponenterna kan vara en kvävningsrisk för ditt barn.
- Pacemaker och annan medicinsk utrustning kan påverkas av Navy, konsultera läkare om du önskar bära enheten närmare än 15 cm från medicinsk utrustning.

Information om återvinning



Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att detta är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på ett korrekt sätt. Vi tar gärna emot enheten och återvinner den för att bidra till att bevara naturresurser.

Övrigt

Vi är noga med att hantera personlig information på ett etiskt försvarbart sätt. Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i något fritextfält i PosifonCare.

Kontakt

Posifon AB

Adress:

Sven Hultins Gata 9C,
412 58 Göteborg

Hemsida:

www.posifon.se

Tel. support:

031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00)

Mail support:

support@posifon.se

