


Snabbstart guide Posifon MiniFinder Pico

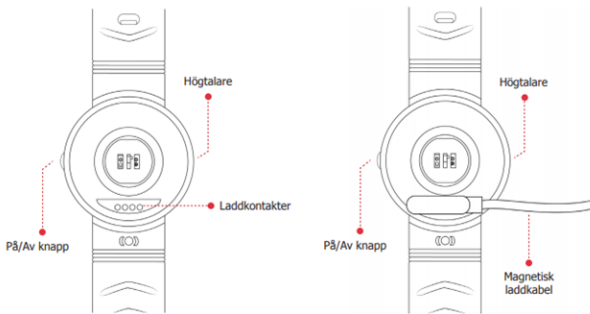

1. Ladda din Posifon MiniFinder Nano

Placera den magnetiska laddkabeln mot Nanos laddkontakter för att påbörja laddning. När enheten laddar lyser den blå LED-lampen med fast sken och den slocknar när enheten är fulladdad. Enheten laddar fullt på ungefär 2 timmar.

2. Innan användning, se till att MiniFinder Nano är PÅ

MiniFinder Nano har två LED-lampor på enhetens ovansida. Se nedan vad de olika kombinationerna av ljussignaler innebär. Blinkar inte någon av LED-lamporna är enheten avstängd. Tryck på knappen på enhetens sida för att starta enheten.

Guide MiniFinder LED-lampor:

Grön LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund	= ansluten till GSM-nätet
Blinkar till två gånger snabbt var 3e sekund	= ansluten till GPRS-nätet
Långsamma och långa blinkningar	= söker GSM-nätet
Lyser med till fast sken (blinkar ej)	= inget eller felaktigt SIM-kort

Blå LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund	= enheten har hittat GPS-satelliter
Långsamma och långa blinkningar	= söker GPS-signal
Lyser med fast sken	= laddning pågår
Lysdiod av	= i viloläge eller fulladdad

Blinkar ingen lampa = enhet avstängd

3. Logga in via webbläsare eller i appen på din SmartPhone.



I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter till systemet www.posifoncare.se och appen PosifonCare. Appen finns både till Android och iPhone telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store för att hitta den. Via appen kan du söka var brukaren befinner sig och hantera larm. Via webbgöransnittet kan du utöver detta också göra de inställningar som önskas. Loggar du in i webbgöransnittet och trycker på hjälp så finns kom igång guider och videos som kan stötta dig i läroprocessen.